

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК

Компания ООО «БИНОВИ» напоминает всем лицам, вовлеченным в процесс реализации медицинских перчаток, что транспортирование и хранение данного вида медицинского изделия должно осуществляться согласно нормативным требованиям законодательства РФ, в частности согласно Приказу Минздрава РФ от 13.11.1996 N 377 (ред. от 23.08.2010) «Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения», ГОСТ ISO 2230-2013 «Изделия резиновые. Руководство по хранению» и ГОСТ Р 57402-2017 «Перчатки медицинские. Определение срока хранения».

Транспортирование медицинских перчаток допустимо всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, без нарушений условий хранения.

Медицинские перчатки необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей или яркого искусственного света, имеющего высокое содержание ультрафиолета, при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха – от 65 до 85%.

Длительное хранение медицинских перчаток (более 7 суток) при температурах выше 25°C приводит к ускоренному старению материала медицинского изделия (натурального и/или синтетического латекса), и как следствие к преждевременной порче изделия.

Также следует быть осторожными с изделиями, хранящимися при температуре ниже 15°C, так как при неосторожном обращении они могут быть жесткими и чувствительными к деформации. После хранения при низкой температуре медицинские перчатки перед использованием должны быть прогреты до 30°C по всему объему изделия.

В помещениях для хранения медицинских перчаток не допускается размещать оборудование, генерирующее озон, такое как ртутные лампы или высоковольтное электрооборудование, являющееся источником повышенного искрообразования или бесшумных электрических разрядов. Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания и ионизирующего излучения. Горючие газы и органические пары должны быть исключены из складских помещений.

Исполнение настоящих требований гарантирует сохранность потребительских качеств медицинских перчаток на протяжении всего срока годности изделия.

